








Eilige Bearbeitung von histopathologischen Proben



Ab dem 01.01.2021 können Sie bei IDEXX zwischen zwei Optionen für die Histopathologie wählen. Zusätzlich zur regulären histopathologischen Untersuchung bieten wir gegen Aufpreis eine bevorzugte Bearbeitung dringender Proben an. Die Bearbeitungszeit beträgt dabei 1 – 3 Werktage ab Eingang der Probe im Labor (regulär 3 – 5 Werktage Untersuchungsdauer).

Für welche Untersuchungen ist diese Option verfügbar?

Die Option ist für die Histopathologische Untersuchung (Testcodes HISTU, HISTU3, HISTU9) sowie für die Histologische Untersuchung von endoskopischen Magen-Darm-Biopsien (Testcode HISTGI) verfügbar. Diese Untersuchungen sind in der Preisliste 2021 mit einem Stoppuhrsymbol kenntlich gemacht.

Wie kann die eilige Bearbeitung von histopathologischen Proben angefordert werden?

HISTOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN	
	HISTP Eilige Bearbeitung histologischer Proben (2 – 3 Tage ab Probeneingang) Bitte immer zusätzlich zur histologischen Untersuchung ankreuzen Nur verfügbar für HISTU, HISTU3, HISTU9 und HISTGI*
	HISTU Histologische Untersuchung, 1 – 2 Lokalisationen*
	HISTU3 Histologische Untersuchung, 3 – 8 Lokalisationen*
	HISTU9 Histologische Untersuchung, > 8 Lokalisationen*
	HISTGI Histologische Untersuchung, Gr. Proben (z.B. komplette Mamma, Milz)
	HISTU Histologische Untersuchung von endoskop. Magen-Darm-Biopsien
	HISTU Histologische Untersuchung von Lebergewebe (Biopsien)

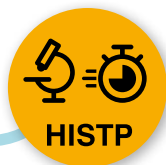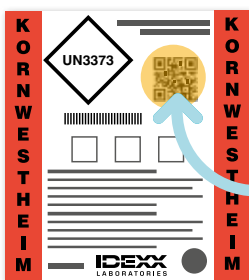

1.

Auf dem Antragschein das Kästchen für HISTP **und** die gewünschte Untersuchung markieren. Bei Anforderung über VetConnect® PLUS wählen Sie bitte ebenfalls beide Untersuchungen aus.

2.

Auf dem Antragschein und dem Probengefäß wie gewohnt den Barcode aufbringen.

3.

In die Sekundärverpackung und den Probenbeutel für Kornwestheim geben.

4.

Außen auf den Probenbeutel den orangefarbenen Aufkleber HISTP an der vorgesehenen Stelle **auf** dem QR-Code anbringen.

5.

Die Probe wie gewohnt an IDEXX senden.

IDEXX GmbH
Humboldtstraße 2 · D-70806 Kornwestheim
idexx.de

IDEXX Vet Med Labor GmbH
Börsegasse 12/1 · A-1010 Wien
idexx.at