




Verpackungsanweisung

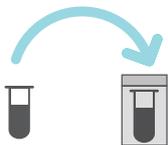

1.

Pro Versandtasche bitte nur einen Patienten.

2.

Probengefäß in die Schutzhülse geben und sicher verschließen.

3.

Auftragsschein und Probenmaterial in den Versandbeutel legen.

4.

Bitte verwenden Sie nur von IDEXX zur Verfügung gestellte Materialien; nicht bruchsichere Artikel sind nicht zum Probentransport zugelassen.

5.

Entfernen Sie den Klebestreifen und verschließen Sie den Versandbeutel sorgfältig.

6.

Den Versandbeutel rechtzeitig in das IDEXX-Übergabedepot legen.