

IDEXX SNAP® Tests – Hinweise zur Entnahme aus dem Kühlschrank

IDEXX SNAP-Tests sowie die zugehörigen Konjugatflaschen können mehrfach aus dem Kühlschrank entnommen und auf Raumtemperatur (**18 – 25 °C**) gebracht werden.

Ein SNAP-Entnahmezyklus umfasst:

- Entnahme aus dem Kühlschrank
- Lagern bei Raumtemperatur zwischen 30 Minuten und max. 8 Stunden
- Zurücklegen in den Kühlschrank

Wichtig: Bitte die Folienverpackung erst öffnen, wenn der SNAP-Test verwendet wird, um eine ordnungsgemäße Funktion der SNAP-Tests zu gewährleisten.

Nähere Informationen zu Handhabung und Lagerung entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

SNAP® Test	Entnahmezyklen
SNAP® 4Dx® Plus*	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test und Konjugatflasche
SNAP® Herzwurm**	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test und Konjugatflasche
SNAP® cPL	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test und Konjugatflasche
SNAP® fPL	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test und Konjugatflasche
SNAP® FIV/FeLV Kombo	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test und Konjugatflasche
SNAP® <i>Giardia</i>	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test und Konjugatflasche
SNAP® Parvo**	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test und Konjugatflasche
SNAP® Lepto	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test und Konjugatflasche
SNAP® Feline proBNP	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test und Konjugatflasche
SNAP® <i>Leishmania</i>	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test und Konjugatflasche
SNAP® Fohlen IgG	30 Entnahmezyklen je SNAP-Test Kit
SNAP® Total T ₄ (SNAPshot Dx®)	15 Entnahmezyklen je SNAP-Test Das Konjugat kann auch direkt aus dem Kühlschrank entnommen und verwendet werden
SNAP® T ₄ (SNAP Reader)	5 Entnahmezyklen je SNAP-Test Das Konjugat kann auch direkt aus dem Kühlschrank entnommen und verwendet werden
SNAP® Cortisol	5 Entnahmezyklen je SNAP-Test Konjugat nicht aufwärmen , sondern direkt aus dem Kühlschrank entnehmen und verwenden
SNAP® Gallensäuren	5 Entnahmezyklen je SNAP-Test Konjugat MUSS vor Anwendung 30 min lang auf Raumtemperatur gebracht werden

*Nach dauerhafter Entnahme aus dem Kühlschrank sind die SNAP 4Dx Plus-Tests 3 Monate haltbar;

liegt das angegebene Verfallsdatum innerhalb dieser Zeit, sind die SNAP 4Dx/4Dx Plus-Tests bis zu diesem haltbar.

**SNAP Herzwurm und SNAP Parvo können auch bei Raumtemperatur (max. 25 °C) gelagert werden.